

# Histofreezer



Histofreezer est indiqué pour les lésions cutanées les plus courantes telles que :

Verrues vulgaires, verrues plantaires, verrues planes, les kératoses actiniques, les kératoses séborrhéiques, taches de vieillesse, condylomes acuminés et molluscum contagiosum, lésions génitales.

Fonctionne d'une seule main.

Le temps de traitement des lésions spécifiques sont de 15-40 secondes.




Résultats cliniquement prouvés.

Ne nécessite aucun équipement encombrant contrairement à l'azote liquide.

Histofreezer est sans CFC .

Prix économique et faible coût par traitement.

**Simple Step Procedure:**

- **1 CHARGE**  
Custom applicator.  
Press valve 3 – 5 seconds  
until droplets start to form.
- **2 INVERT**  
Canister for 15 seconds  
for optimal freezing  
temperature.
- **3 APPLY**  
A frozen applicator to lesion  
for 15 – 40 seconds.  
Indication treatment times  
(see *Histofreezer® Directions  
for Use*).

Il existe 3 emballages de 2x80 ml :

**Small** 60 applicateurs de 2mm

**Medium** 52 applicateurs de 5mm

**Mix** 30 applicateurs de 2mm et 30 applicateurs de 5mm

**Pour de plus amples informations sur un produit, vous pouvez nous joindre:**

Delpharm Sàrl  
Plantaz 10 1024 Ecublens  
Tel : 021.691.28.50 Fax 021.691.28.04  
Mail : delpharm@bluewin.ch