



Cryo Professional

*Veillez lire attentivement la notice d'utilisation avant d'utiliser ce produit
Utilisez toujours ce produit conformément aux instructions de la notice.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner des réactions thermiques,
des lésions cutanées, des lésions nerveuses et la formation de cicatrices.
Réservé à un usage externe.
Réservé à un usage professionnel.*

Contenu :

1x Aérosol. Contenant 170 ml de cryogène composé d'éther diméthylque, de propane et d'isobutane. *Le cryogène n'est pas nuisible pour la couche d'ozone.*
1x Boîte d'embouts en mousse : l'emballage contient des petits embouts en mousse de 2mm et/ou des embouts en mousse de taille moyenne de 5mm. À usage unique pour un seul patient.
1x Notice d'utilisation.

Description :

Le produit est utilisé pour le traitement de différentes lésions cutanées bénignes. Plusieurs tailles d'embouts en mousse sont fournies ; elles peuvent être utilisées selon la lésion à traiter. La durée de traitement varie en fonction du type de lésion cutanée.

MISE EN GARDE : N'utilisez pas d'autres marques d'embouts en mousse. L'utilisation d'autres marques d'embouts en mousse pourrait influencer les performances du produit et entraîner des dommages indésirables à la peau et aux tissus sous-jacents.

Utilisation et indications :

Le produit est destiné à des patients âgés de plus de 4 ans présentant des lésions cutanées.

Le produit est indiqué pour le traitement des lésions cutanées suivantes :

- Verrues génitales
- Molluscum Contagiosum
- Acrochordon (balises de la peau)
- Verruca (Plantaris, Vulgaris, Plana)
- Kératose séborrhéique (KS)
- Kératose actinique (KA, faciale et non faciale)
- Lentigos, (faciaux et non faciaux)

Contre-indications :

Cryo Professional ne doit pas être utilisé :

- Quand il y a (eu) un diagnostic confirmé de cancer de la peau et un traitement de cancer de la peau.
- Chez les personnes diabétiques ou souffrant de problèmes circulatoires.
- Chez les patients présentant une cryoglobulinémie.
- Les patients utilisant des immunosuppresseurs médicamenteux.

Mise en garde et précautions d'emploi :

- Ne pas utiliser à proximité d'autres gaz médicaux ou liquides et de matériel de diathermie ou avec du matériel de diathermie.
- Une hypopigmentation et/ou une hyperpigmentation inflammatoire peuvent se produire sur une peau fortement ou faiblement pigmentée.
- Le traitement par cryothérapie des zones des artères périphériques telles que les extrémités peut résulter en une nécrose autour des lésions traitées.
- La formation de cicatrices est rare quand le derme n'est pas endommagé par la cryochirurgie.
- Ne pas saturer de nouveau l'applicateur en mousse en cours d'utilisation car cela diminue la fonction réservoir de l'applicateur en mousse.
- Ne pas activer l'aérosol quand l'applicateur en mousse est en contact avec le patient.
- Aérosol extrêmement inflammable.
- Récipient sous pression : peut exploser sous l'effet de la chaleur.
- Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas inhaler le brouillard de pulvérisation.
- Conserver à l'écart de la chaleur, de surfaces chaudes, d'étincelles, de flammes nues et d'autres sources d'inflammation.
- Ne pas fumer.
- Ne pas percer ou brûler, même après utilisation.
- Ne pas pulvériser sur une flamme ouverte ou une autre source d'inflammation.
- Protéger des rayons du soleil.
- Ne pas exposer à des températures supérieures à 50 °C/122 °F.
- Eliminer ce produit et son récipient conformément à la législation locale.
- Un soin tous particulier devrait être pris en utilisant ce produit sur les femmes enceintes ou allaitants.


Instruction pour le traitement

Type de lésion cutanée

Verrues ano-génitales (condyloma acuminatum)
Molluscum Contagiosum
Acrochordon (balise de la peau)
Verruca plantaris
Verruca vulgaris
Verruca plana
Kératose séborrhéique (KS)
Kératose actinique (KA faciale)
Kératose actinique (KA non faciale)
Lentigo (facial)
Lentigo (non facial)

Durée de traitement recommandée

40 secondes
20 secondes
40 secondes
40 secondes
40 secondes
20 secondes
40 secondes
15 secondes
40 secondes
15 secondes
40 secondes

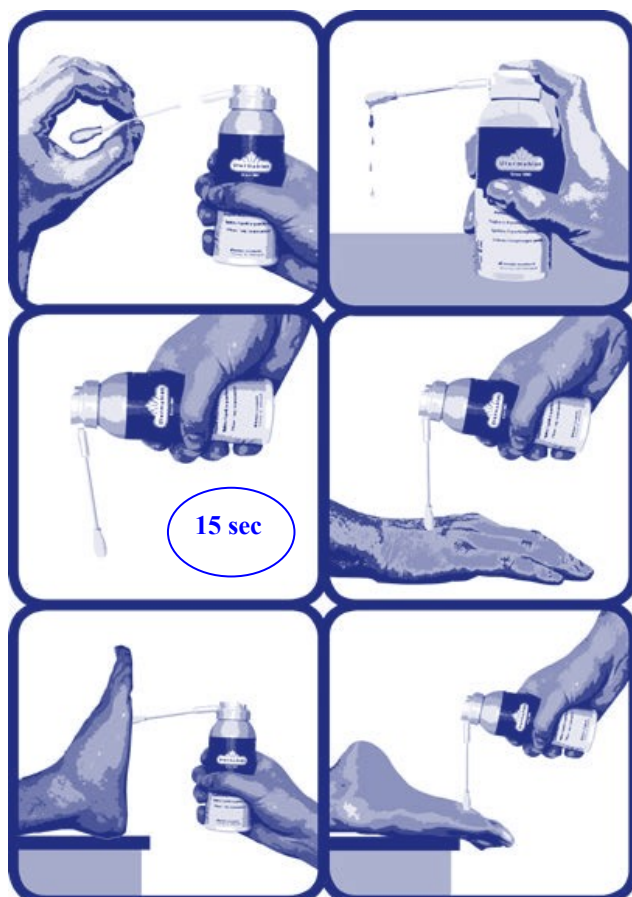

1. Déterminer le type de lésion cutanée à traiter. Traiter les lésions de plus de 5mm en plusieurs phases.
2. Appliquer le traitement antiseptique approprié pour éviter le risque d'infection.
3. Déterminer la meilleure façon de traiter la lésion cutanée. Dans le cas de verrues, il se peut que l'application d'un agent kératolytique soit requise avant le traitement par cryothérapie ; cet agent n'influence pas les performances du produit.
4. Déterminer l'applicateur en mousse à utiliser (2mm ou 5mm) et le fixer au diffuseur.
5. Retirer le capuchon de protection de l'aérosol et activer le diffuseur avec le pouce ou l'index pour saturer l'applicateur en mousse en cryogène jusqu'à ce que des gouttelettes tombent de l'applicateur en mousse. Toujours maintenir l'aérosol à la verticale pendant la saturation de l'applicateur en mousse. Tenir l'aérosol à distance des personnes présentes dans la pièce.
6. Maintenir l'aérosol à un angle de 90° pour que l'applicateur en mousse soit à verticale et dirigé vers le bas.
7. Attendre 15 secondes pour laisser l'applicateur en mousse atteindre sa température de fonctionnement.
8. Placer l'applicateur en mousse sur la lésion cutanée à traiter en exerçant une légère pression. Appliquer l'applicateur en mousse sur la lésion pendant la durée de traitement recommandée indiquée dans le tableau. Toujours maintenir l'applicateur en mousse vers le bas à la verticale (angle de 90°).
9. Répéter le traitement 4 fois maximum en respectant un intervalle de 2 semaines entre les traitements.

Effets indésirables potentiels

Il convient de s'assurer que le patient est informé des effets indésirables potentiels :

1. Une douleur ou une sensation de brûlure.
2. Formation de cloques.
3. Hypopigmentation.
4. Hyperpigmentation inflammatoire.
5. L'atrophie de la peau.



Pour de plus amples informations sur un produit, vous pouvez nous joindre:

Delpharm Sàrl
Plantaz 10 1024 Ecublens
Tel : 021.691.28.50 Fax 021.691.28.04
Mail : delpharm@bluewin.ch